

Instrucciones de limpieza y desinfección de: instrumental de prótesis

Protocolo a realizar por personal cualificado para la preparación del instrumental para su uso.

ATENCIÓN: el instrumental debe limpiarse y desinfectarse después de cada uso y esterilizarse previamente a su siguiente uso. Preste atención a los elementos punzantes, se recomienda el uso de guantes para evitar accidentes durante la manipulación al seguir estas instrucciones. No limpiar ni desinfectar juntos instrumental de diferente material.

Limpiar y desinfección del instrumental

1 - Desmontaje

- Desmonte el instrumental que lo requiera como las carracas dinámicas NetPlus® (ver esquema inferior), puños y puntas desatornilladoras...

2 - Limpieza

- Sumerja el instrumental en una solución de producto limpiador indicado para instrumental dental para facilitar la eliminación de los restos biológicos adheridos.
- Retire los restos biológicos manualmente con un cepillo suave y detergente de pH neutro.
- Aclare con abundante agua.
- Realice un aclarado final con agua desionizada.

3 - Desinfección

- Sumerja el instrumental en un producto desinfectante explícitamente indicado para instrumental dental.
- Para realizar la desinfección con un equipo de ultrasonidos: sumerja el material en el baño de ultrasonidos.
- Aclare con abundante agua desionizada para eliminar los restos del desinfectante.
- Seque el material con aire comprimido filtrado.


4 - Inspección

- Inspeccione que el instrumental esté perfectamente limpio, de lo contrario, repita los pasos de limpieza y desinfección anteriores.
- Descarte el instrumental que muestre desperfectos y sustitúyalo antes del siguiente uso.
- Verifique que el instrumental está perfectamente seco antes de realizar su montaje y proceder a la esterilización.

IMPORTANTE:

- Siga las instrucciones del fabricante del producto desinfectante para determinar las concentraciones y tiempos.
- Siga las instrucciones del fabricante del equipo de ultrasonidos para determinar la temperatura, concentración y tiempos.

Desmontaje de carracas dinámicas NetPlus®

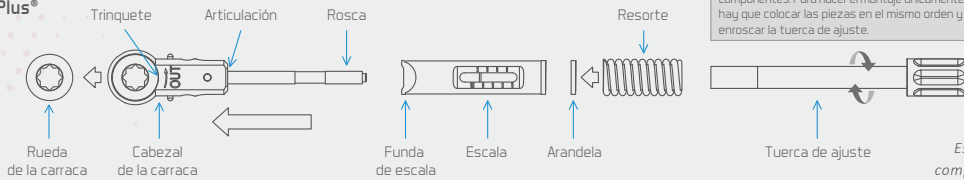

Instrucciones de esterilización de: aditamentos e instrumental de prótesis

Protocolo a realizar por personal cualificado para la esterilización de los aditamentos e instrumental para su uso.

ATENCIÓN: todos los aditamentos y el instrumental se suministran SIN ESTERILIZAR. Deben esterilizarse siguiendo las indicaciones antes del primer uso clínico. Deben ser extraídos de su envase original para su esterilización previa al primer uso clínico. El instrumental debe limpiarse y desinfectarse después de cada uso y esterilizarse previamente a su uso. No esterilizar juntos instrumental de diferente material, excepto si se utiliza correctamente en una caja protésica.

Esterilización en autoclave de vapor: esterilización de aditamentos e instrumental

1. Introduzca el material individualmente en bolsas de esterilización y selle las bolsas.
Para esterilización conjunta: monte el instrumental en una caja, introduzca la caja en una bolsa de esterilización y selle la bolsa.
2. Introduzca en el autoclave las bolsas a esterilizar.
3. Esterilice en autoclave de vapor a 134°C/273°F (máx. 137°C/276°F), durante 4 min (mínimo) y 2 atm de presión. Sólo para Estados Unidos: el ciclo de esterilización validado y recomendado es en autoclave de vapor y gravedad a 132°C/270°F, mínimo 15 min y tiempo de secado 15-30 minutos.

IMPORTANTE:

- Asegúrese de que se completa la fase de secado establecida para evitar que los productos salgan húmedos.
- Revise el equipo de esterilización si el material o las bolsas de esterilización presentan humedad al finalizar la esterilización.
- Realice el mantenimiento del autoclave con la periodicidad establecida y las acciones necesarias, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Conservación de los productos NetPlus® (aditamentos e instrumental)

- Mantenga los productos en los envases originales de NetPlus® en un ambiente seco y limpio hasta su uso.
- Tras la esterilización, conserve los productos (instrumental y aditamentos) en sus bolsas de esterilización selladas y en un ambiente seco y limpio.
- Nunca sobrepase las fechas de caducidad determinadas por el fabricante de las bolsas de esterilización.

IMPORTANTE:

- Siga las indicaciones del fabricante de las bolsas de esterilización.



Nota. Para consultar la versión más actualizada de las instrucciones de limpieza, desinfección y esterilización, visite nuestra web www.netplusdental.com

Recomendaciones generales

- Nunca utilice material dañado o sucio. Nunca reutilice productos indicados para un solo uso, el usuario es el responsable del correcto seguimiento de las instrucciones descritas en este documento.
- Utilice siempre guantes durante la limpieza del material.
- Siga las indicaciones de seguridad indicadas por el fabricante del agente desinfectante.
- La esterilidad no se puede garantizar si la bolsa de esterilización está abierta, dañada o mojada.
- Respete todas las fases del esterilizador. En caso de que el material o las bolsas de esterilización presenten restos de agua o humedad, revise el autoclave y seque las bolsas.
- Realice el mantenimiento del autoclave según su fabricante, con la periodicidad establecida.
- Los procesos de esterilización, limpieza y desinfección deterioran progresivamente el instrumental. Inspeccione el instrumental minuciosamente para detectar signos de deterioro.
- Netplus Dental Abutments recomienda seguir estas instrucciones para evitar perjudicar la finalidad y seguridad de sus productos. Si se utilizan procedimientos alternativos, es responsabilidad del usuario asegurarse de que con el procedimiento de limpieza, desinfección y esterilización escogidos se consiguen los resultados deseados sin afectar los productos.